

REINIGEND DESINFECTIEPRODUCT VOOR **PRE-DESINFECTIE** VOOR TANDHEELKUNDIGE INSTRUMENTEN

DENTASEPT Tri-Enzymatic

REINIGING EN DESINFECTIE VAN MEDISCHE INSTRUMENTEN IN DENTALE OMGEVINGEN

- Formule met drie enzymen: Protease / Lipase / Amylase
- Bevat geen chloriden
- 1 liter levert 200 liter gebruiksooplossing op
- Effectief in slechts 7 minuten
- Actief tegen omkapselde virussen
- Kan worden gebruikt in ultrasoonbaden
- Neutrale pH, wanneer verdund, compatibel met een groot aantal materialen



DENTASEPT Tri-Enzymatic

Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen in tandheelkundige omgevingen

PRODUCTKENMERKEN


- pH van zuiver product: ongeveer 8,5
- pH bij 1,0% in leidingwater: 7,3
- pH bij 1,0% in zacht water: 7,6

GEBRUIKSAANWIJZING

Geconcentreerd product.



Te gebruiken voor inweking en ultrasoon bad. Doseer de vereiste oplossing.

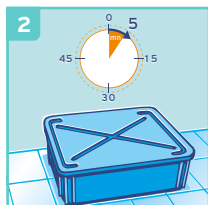

Het medische hulpmiddel volledig onderdompelen. Houd het inweekbad gedurende de contacttijd afgedekt.



Borstel bij zichtbare vervuiling.



Spoel de behandelde medische hulpmiddelen grondig af met leidingwater om alle sporen van product en organische vervuiling te verwijderen.

Vervang de oplossing zodra deze zichtbaar vervuild is en ten minste eenmaal per dag om de werkzaamheid van het product te behouden.

DOSERINGSTABEL

LITER OPLOSSING	CONCENTRATIE VAN DE TOEGEPASTE OPLOSSING
	0,5%
1 liter	5 ml
2 liter	10 ml
5 liter	25 ml
10 liter	50 ml

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

CLAIM/VOORWAARDEN	CONCENTRATIE	CONTACTTIJD
Bacteriedodend* Volgens EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Gistdodend* Volgens EN 13624/EN 14562	0,5%	5 min
Actief op omkapselde virussen* Volgens EN 14476/EN 17111	0,5%	7 min

* Vuile condities

VERPAKKING EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
Dentasept Tri-Enzymatic	12 x 1 L fles	3127300
Dentasept Tri-Enzymatic	1 x 5 L bus met 10 ml pompje	3127800



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Verdeeld door :

ECOLAB BV
Oude Rhijnhofweg 17
2342 BB Oegstgeest
Nederland



www.ecolab.com

www.anios.com

TOEPASSINGSGEBIED

Reiniging en desinfectie van tandheelkundige instrumenten vóór sterilisatie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Geconcentreerd product.

- Te gebruiken voor inweking en ultrasoon bad. Doseer de vereiste oplossing.
- Het medische hulpmiddel volledig onderdompelen. Houd het inweekbad gedurende de contacttijd afgedekt.
- Borstel bij zichtbare vervuiling.
- Spoel de behandelde medische hulpmiddelen grondig af met leidingwater om alle sporen van product en organische vervuiling te verwijderen.

Vervang de oplossing zodra deze zichtbaar vervuild is en ten minste eenmaal per dag om de werkzaamheid van het product te behouden.

BESTANDELEN

Quaternair ammonium propionaat, Chloorhexidine digluconaat, niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, enzymencomplex (protease, lipase en amylase), parfum, kleurstof, hulpstoffen.

OPSLAG


Gevaarlijk - de voorzorgsmaatregelen voor gebruik in acht nemen (opgesteld volgens de geldende Europese regels voor de indeling en etikettering van chemische producten). Opslag: van +5°C tot +25°C.

CERTIFICATEN

Medisch hulpmiddel. De volledige antimicrobiële activiteit voor Dentasept Tri-Enzymatic is opgenomen in het wetenschappelijk dossier, dat op verzoek verkrijgbaar is.

MEDISCH HULPMIDDEL VEILIG GEBRUIKEN

Lees het etiket en de productinformatie.

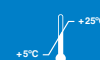

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.