



## REINIGING EN VOORDESINFECTIE VAN INSTRUMENTEN

### Anios'Clean Excel D

#### PRE-DESINFECTEREND REINIGINGSMIDDEL VAN INSTRUMENTEN

- Gepatenteerd concept
- Een unieke combinatie van werkzame stoffen in synergie
- Niet-corrosief, compatibel met een breed scala aan medische materialen




# Anios'Clean Excel D

Pre-desinfecterend reinigingsmiddel van instrumenten


## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Helderblauwe vloeistof
- Product pH (onverdund): min 6,5 - max 7,5
- pH bij 0,5% in leidingwater: 7,4
- pH bij 0,5% in onthard water: 7,6
- pH bij 0,5% in gedemineraliseerd water: 6,6


## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

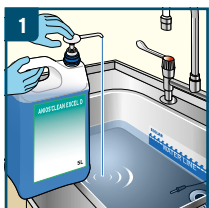


1 Geconcentreerde oplossing. De bijbehorende pomp vóór het eerste gebruik opstarten. Onderdompelen in de juiste verdunde verhouding met inachtneming van een minimale contacttijd van 5 min.

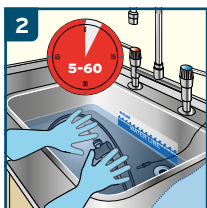

2 Dompel het medische hulpmiddel volledig onder. Houd het dompelbad afgesloten tijdens de contacttijd. Borstelen wanneer zichtbare vlekken aanwezig zijn.

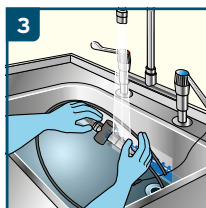

3 De medische hulpmiddelen overvloedig spoelen met leidingwater om alle sporen van product en organisch vuil te verwijderen.

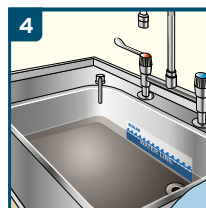

4 Vervang de oplossing zodra deze zichtbaar vuil is en ten minste één keer per dag om de doeltreffendheid van het product te behouden.

## MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

EIS/VOORWAARDEN	CONCENTRATIE	INWERKTijd
Bacteriedodend* volgens EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Schimmeldodend* volgens EN 13624/EN 14562	0,5%	15 min
Tuberculosedodend* volgens EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Actief op omhulde virussen volgens EN 14476/EN 17111	0,5%	15 min
Actief op het Polyomavirus SV40* volgens EN 14476/EN 17111	2,0%	60 min
Volgens VAH (bacteriedodend*, gistdodend*)	1,5%	15 min

\* = vervuilingsgraad

## VERPAKKING EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	REF
Anios'Clean Excel D	12 x 1 L	3119700
Anios'Clean Excel D	2 x 5 L	3119740



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Verdeeld door:

**ECOLAB BV**  
Noordkustlaan 16C  
1702 Groot-Bijgaarden  
België  
Tel.: 02 467 51 50

**ECOLAB BV**  
Oude Rhijnhofweg 17  
2342 BB Oegstgeest  
Nederland  
Tel.: 071 524 12 00



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

## TOEPASSINGSGBIED

Reiniging en desinfectie van medische hulpmiddelen: chirurgische en medische instrumenten, warmtegevoelige instrumenten en endoscopisch materiaal voor hun sterilisatie.

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. Geconcentreerde oplossing. De bijbehorende pomp vóór het eerste gebruik opstarten. Onderdompelen in de juiste verdunde verhouding met inachtneming van een minimale contacttijd van 5 min.
2. Dompel het medische hulpmiddel volledig onder. Houd het dompelbad afgesloten tijdens de contacttijd. Borstelen wanneer zichtbare vlekken aanwezig zijn.
3. De medische hulpmiddelen overvloedig spoelen met leidingwater om alle sporen van product en organisch vuil te verwijderen.
4. Vervang de oplossing zodra deze zichtbaar vuil is en ten minste één keer per dag om de doeltreffendheid van het product te behouden.

## INGREDIËNTEN

Didecylidimethylammoniumchloride, Chloorhexidinedigluconaat, niet ionische actieve stoffen, parfum, Kleurstof, excipienten.

## OPSLAG

Gevaarlijk - respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik (opgesteld volgens de geldende Europese regels voor de classificatie en etikettering van chemische producten).

## CERTIFICATEN

Medisch hulpmiddel. De volledige antimicrobiële activiteit voor Anios'Clean Excel D is opgenomen in het wetenschappelijk dossier, verkrijgbaar op aanvraag.

## VEILIG GEBRUIK VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN

Lees het etiket en productinformatie.